

VISIERA PROTETTIVA (VP)

CE Cat. 1 EN166: 2001



AUTOCERTIFICAZIONE PER MARCHIATURA CE CAT 1 EN166

VISIERA PROTETTIVA (VP)


FOAM E.V.A. 300/100 •

RIVETTI METALLICI •

INTERNO PVC SPESSORE 0,5 mm •

ELASTICO DI ALTEZZA 2 cm •

PET TRASPARENTE DI SPESSORE 0,5 mm •

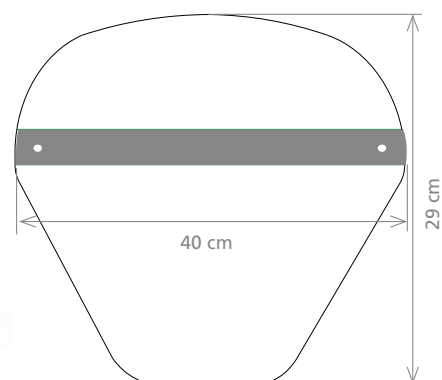

ELENCO MATERIALI

- PET Trasparente di spessore 0,5 mm •
- Interno PVC spessore 0,5 mm •
- FOAM E.V.A. 300/100 •
- Rivetti metallici •
- Elastico di altezza 2 cm •

SCOPO FINALE

Realizzato al fine di una prima protezione da schizzi di vari liquidi

MISURE

- base cm 40
- altezza cm 29
- profondità cm 15

AVVERTENZE

Modello/Tipo DPI: Visiera Protettiva

Anno di costruzione: 03/2020

Materiale della visiera: PET (trasparente)

Il presente DPI è **CE** di Categoria I (rischi minimi) ed è conforme alla norma EN 166: 2001

AVVERTENZE

Istruzioni d'uso e manutenzione

L'utilizzatore prima di procedere all'impiego del DPI deve verificare che sia adeguato all'uso previsto (prendendo completa lettura delle presenti istruzioni). Se il DPI viene utilizzato con altri DPI, l'utilizzatore deve valutare se la combinazione è idonea all'utilizzo. Indossare il DPI prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali è richiesta la protezione. I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori. Nell'eventualità che durante l'uso il DPI venga danneggiato deve essere immediatamente sostituito; in caso di contaminazione il DPI deve essere immediatamente smaltito e sostituito. Non esporre il DPI a fonti di calore o radiazioni UV.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Dopo ogni uso, prima di riporlo nella confezione, verificare l'integrità di ogni componente e pulire il DPI con sapone. Igenizzare con una soluzione alcolica per almeno 15 minuti, e lasciare asciugare. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non utilizzare detergenti o disinfettanti abrasivi. Conservare nella confezione soltanto DPI non contaminati, a temperatura tra i 5°C e 40°C in ambiente asciutto e privo di vapori organici o polveri abrasive.

DURATA

In relazione al contesto di impiego, la durata del DPI è correlata alla valutazione dell'utilizzatore a cui si demanda la responsabilità dell'utilizzo. In condizioni normali, l'articolo può essere utilizzato anche per più di 6 mesi dall'apertura della confezione, a meno di requisiti più stringenti derivanti dal contesto di impiego e se vengono rispettate le indicazioni relative all'impiego, alla manutenzione, pulizia e conservazione. Procedere comunque alla sostituzione del DPI ogni 2 anni e anticipatamente se si denotano segni di degrado.







